


QUICK SETUP  
GUIDE

SECULIFE IS



Der SECULIFE IS vereinfacht die Qualitätssicherung beim Einsatz von Befundungsmonitoren oder Betrachtungsgeräten in der Medizin nach DIN V 6868-57. Zugleich kann der für die Überwachung der in der kommenden DIN 6868-157 vorgesehenen Raumklassen für medizinische Tätigkeiten eingesetzt werden. Der Einsatz des SECULIFE IS verlängert den Zyklus der Konstanzprüfungen an Bildwiedergabegeräten (BWG) bei den Kenngrößen „Schleierleuchtdichte“ und „Maximalkontrast“ auf bis zu halbes Jahr.

## SECULIFE IS

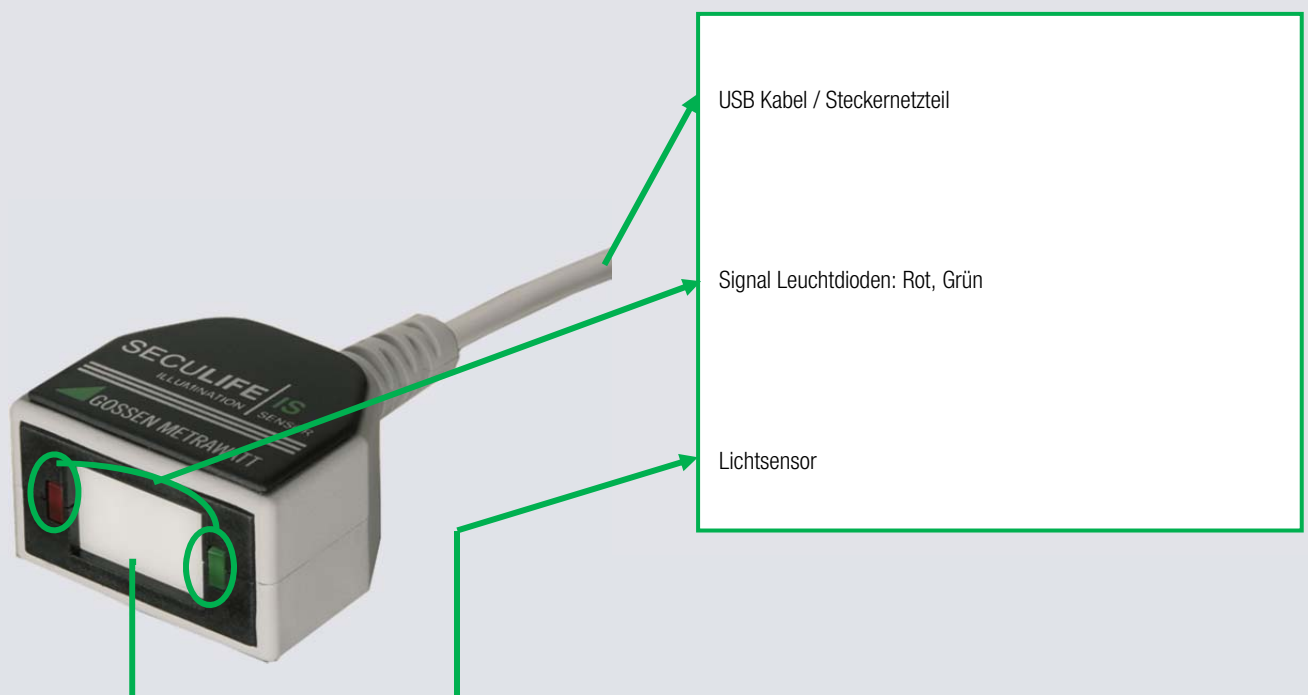

## Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme des SECULIFE IS erfolgt schnell und einfach:

Das Gerät wird mit seinem Netzteil oder an einer USB-Schnittstelle des Messcomputers angeschlossen und am Monitor aufgeklebt.

Der SECULIFE IS wird, mittels auf der Unterseite angebrachten Klebepads, auf der Oberkante des Monitors befestigt. Die Front des SECULIFE muss dabei in einer Linie mit der Front des Monitors sein. Nach Befestigung des SECULIFE IS am Monitor kann dieser nicht mehr entfernt werden.

**HINWEIS!** Eine gewaltsame Entfernung der Überwachungseinheit kann zur Zerstörung derer Bodenplatte führen!

- 1) SECULIFE IS am Monitor befestigen
- 2) Mittels USB Kabel: entweder an eine vorhanden USB Schnittstelle oder an das mitgelieferte Steckernetzteil anschließen
- 3) Leuchtdioden beachten



**GMC INSTRUMENTS**



**GMC-I Messtechnik GmbH**

Südwestpark 15 □ 90449 Nürnberg □ Germany

TEL +49 911 8602-111 □ FAX +49 911 8602-777

[www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com) □ [info@gossenmetrawatt.com](mailto:info@gossenmetrawatt.com)